




GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN RESPONDER 4000



GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN RESPONDER 4000

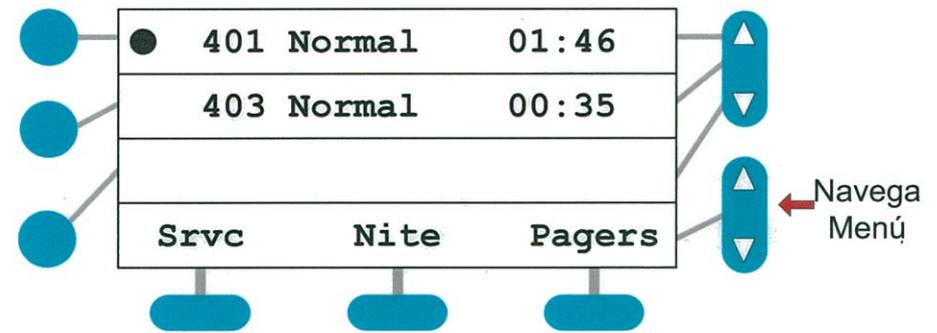

Para contestar una llamada:

- 1 Levante el Auricular
O Presione (Pulse-Para-Hablar)
- 2 Hable por Auricular
O Presione (Suelte para Escuchar)
- 3 Cuelgue para Cancelar O Presione (Pulse-Para-Hablar)

Cambiar una Llamada Normal a Emergencia:

- 1 Atienda la Llamada
- 2 Pulse **Emerg**
- 3 Cancele Colgando O Presione (Pulse-Para-Hablar)

Para Atender Selectivamente una Llamada:

- 1 Recorra la Lista de Llamadas
- 2 Elija la que desee Contestar
- 3 Levante el Auricular O Presione (Pulse-Para-Hablar)

Para Habilitar Tonos de Noche (Bajos):

- 1 Presione **Noche**
- 2 Aparece el Indicador **Noche**
- 3 Presione de Nuevo Para Volumen Normal **Noche**

Para Establecer una Llamada:

- 1 Disque el Número de Habitación : Cama (si aplica) (Pulse-Para-Hablar)
- 2 Levante Auricular O Presione (Pulse-Para-Hablar)



Cencomex,S.A.
 Ave. Condell 272
 Providencia, Santiago, Chile
 T. 02-750-2801 F. 02-750-2820
 lalegria@cencomex.cl
 frank.arzani@rauland.com

Para Habilitar Tonos a Cuartos (Seguimiento):

<p>1 Presione</p> <p>Sigue</p>	<p>2 Aparece el Indicador</p> <p>▶ Sigue</p>	<p>3 Presione de Nuevo Para Terminar</p> <p>Sigue</p>
---------------------------------------	---	--

Para Localizar Personal :

<p>1 Presione</p> <p>▶ Reg</p> <p>Aparece el Primer Cuarto c/ Registro</p>	<p>2 Recorra la Lista de Llamadas</p>	<p>3 Presione</p>
---	---------------------------------------	-------------------

Para Programar un Paciente con Prioridad:

<p>1 Disque Número Habitación : Cama</p>	<p>2 Presione</p> <p>Prior</p>	<p>3 Presione</p>
--	---------------------------------------	-------------------

Para Monitor de Habitaciones:

<p>1 Presione</p> <p>Monit</p>	<p>2 Disque Número Habitación : Cama</p>	<p>3 Presione</p> <p>Agregar</p> <p>Repita (2) y (3) para otras camas</p>
---------------------------------------	--	--

Para Desplegar Pacientes con Prioridad:

<p>1 Presione</p> <p>▶ Prior</p> <p>Aparece el Primer Paciente c/ Prioridad</p>	<p>2 Recorra la Lista de Llamadas</p>	<p>3 Presione</p>
--	---------------------------------------	-------------------

<p>4 Para comenzar la secuencia</p> <p>Inicio</p>	<p>5 Si desea Suspender Temporalmente</p> <p>Pausa</p>	<p>6 Para Terminar</p> <p>Salir</p>
--	---	--

Para Terminar la Prioridad de un Paciente:

<p>1 Disque Número Habitación : Cama</p>	<p>2 Presione</p> <p>▶ Prior</p>	<p>3 Presione</p>
--	---	-------------------

“ RECUERDE SIEMPRE REGISTRAR SU ENTRADA / SALIDA DE LA HABITACION “