

PROTOCOLO DE FUNCIONES BASICAS

PASOS A SEGUIR:

- ☐ 1. Una llamada de paciente se activa después de oprimir por un momento el botón que se encuentra en la pera del cordón de llamada.
- ☐ 2. Emitirá un sonido en la consola y panel de enfermera durante el tiempo en que la llamada sea atendida.
- ☐ 3. Encenderá una luz de color blanco en la lámpara de pasillo a la entrada de cuarto del paciente.
- ☐ 4. Desplegara un mensaje predefinido como “Normal” para esa llamada en la Consola de Enfermera con el número del Piso, # de Habitación, # de cama y emitir repetidamente un sonido suave hasta que la llamada sea cancelada.
- ☐ 5. La llamada de paciente se cancela automáticamente cuando la enfermera atiende la llamada en la consola modificando la señalización de la luz de pasillo (luz verde parpadeando),
- ☐ 6. Se abre un canal de audio entre la habitación (paciente) y la consola (enfermera) para tomar el requerimiento.
- ☐ 7. Cuando la enfermera entra a un cuarto a atender un paciente, ella registra su presencia en ese cuarto oprimiendo el botón de Presencia colocado a la entrada del cuarto o en el panel de cabecera encima de la cama del paciente.

- ☐ 8. Cambia la luz de corredor a la entrada del cuarto del estado Llamada de Paciente (blanco) a Presencia de Enfermera (verde fijo).
- ☐ 9. Tranquiliza la llamada de paciente en habitación, Consola de Enfermera y en los avisos luminosos de corredor acoplados a esta consola.
- ☐ 10. Oprimiendo nuevamente el botón de presencia de enfermera se efectúa la cancelación de Presencia de Enfermera en la habitación y se finaliza el servicio.

Estos son los pasos generales a seguir para realizar la entrega habitación en buenas condiciones, sistema de llamada Responder 4000.

Firma Supervisor Cencomex:

Firma Responsable de Clínica.

Fecha de Recepción: