


Créer votre clé USB bootable pour 402 B2.1

Prérequis :


- Un clé USB minimum 4 Go avec aucunes données personnelles dessus
- Le fichier nommé « 402_Image_USB_B_2_1.zip»

Instructions :


- Dé zipper le fichier « 402_Image_USB_B_2_1.zip»
- Lancer le programme imageUSB.exe

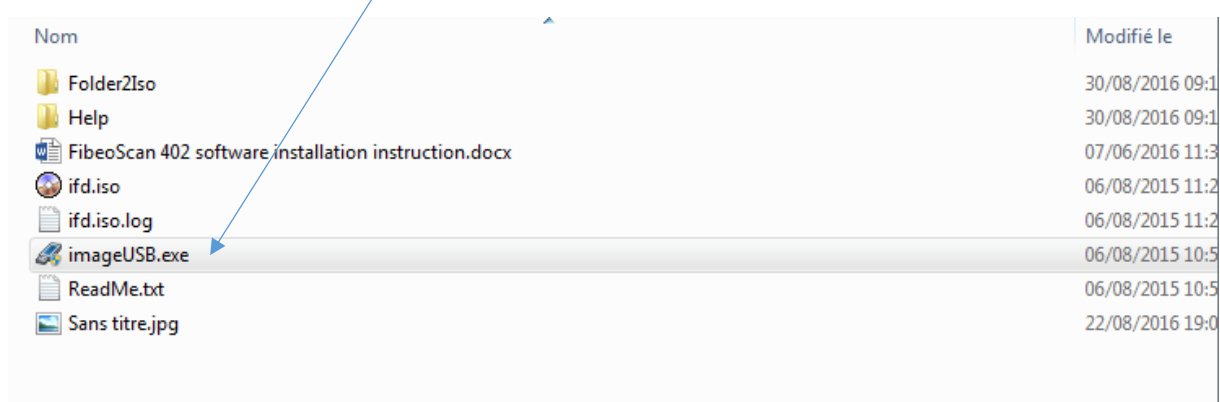


- Sélectionner votre clé USB en cochant la case et vérifier que c'est bien le fichier ifd.iso

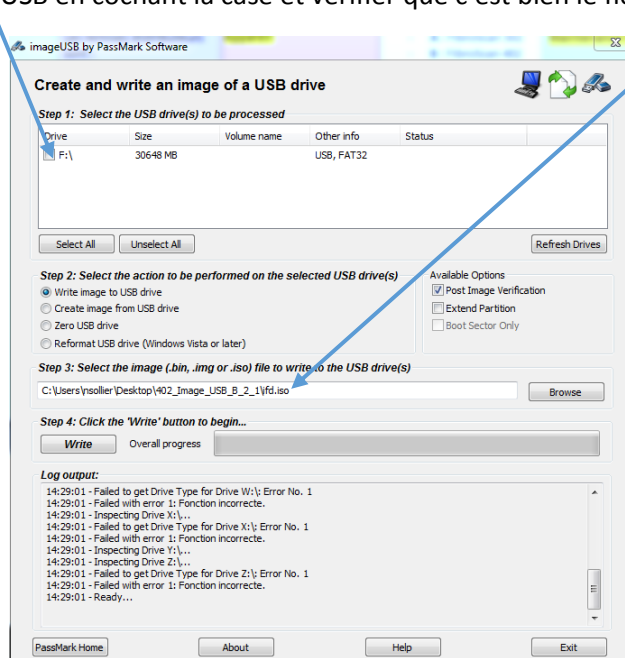


- Cliquer sur Write et la fenêtre ci-dessous va apparaitre, cliquer sur YES

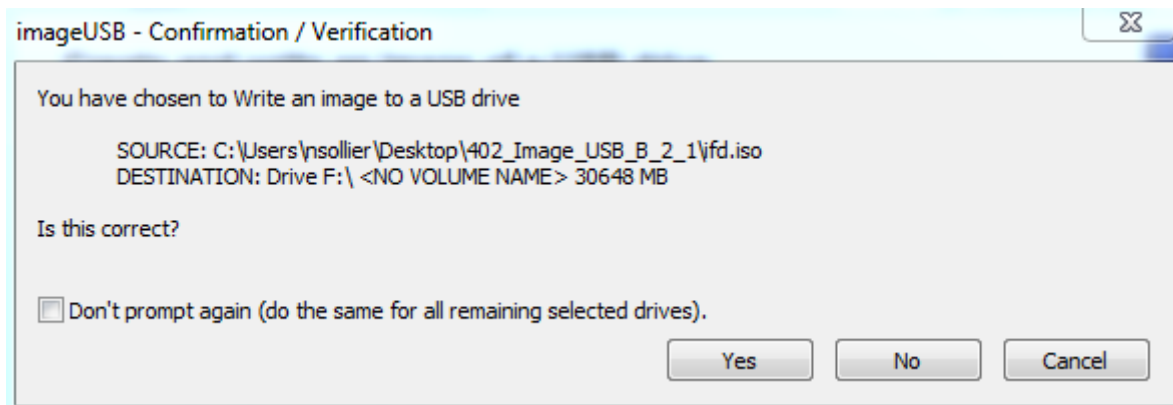

-Une seconde fenêtre va apparaître, cliquer sur YES

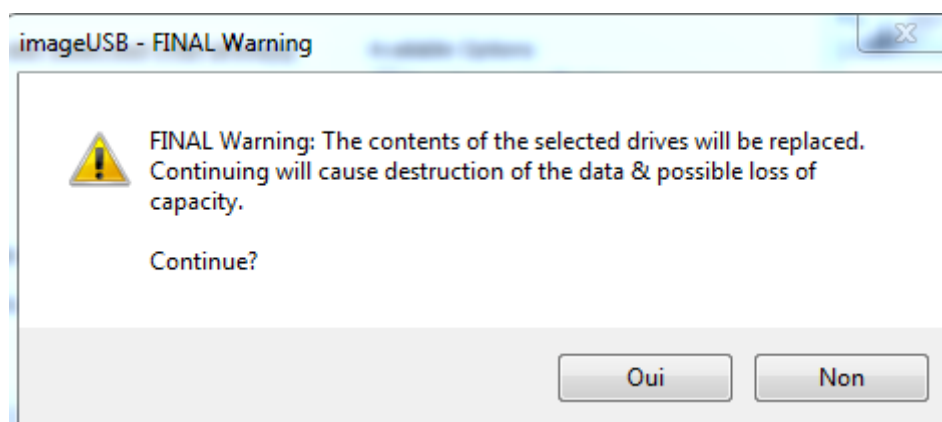

-La clé USB est en cours de programmation, vous pourrez suivre l'état d'avancement via la barre de progression, à la fin de celle-ci, une fenêtre va apparaître avec le message « Complete OK

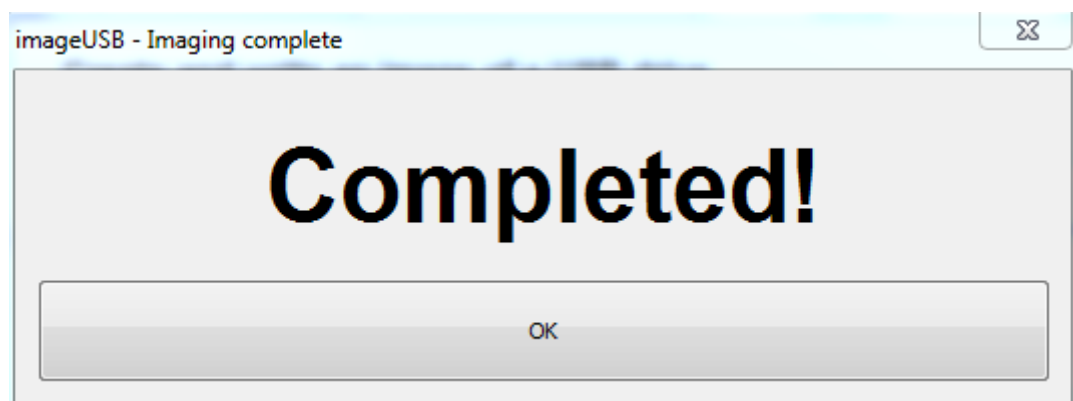

-Cliquer sur OK

Vos clé USB est maintenant bootable, merci de suivre l'instruction « FibroScan 402 software installation instruction » dans le fichier dé zippé.

Celle-ci est en anglais, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez de l'aide.