

Les fils des switchs seront maintenus dans les gorges coté intérieur avec de la colle SILICOMET (TMS 224110)

diode L.A.S.E.R n°1

Bords sensible TMS 228933

diode L.A.S.E.R n°2

diode L.A.S.E.R n°1
Cable d'alimentation
d'origine à rallonger

diode L.A.S.E.R n°2
Cable d'alimentation
d'origine à rallonger

28
Soudure

27

2 Cm
maxi.

470 mm

VALIDE PAR LA
DOCUMENTATION LE
02/07/2012

REP	QTE	DESIGNATION	REF
23	1	Connecteur Molex 4 pts femelle	229588
24	2	Contact male MOLEX 18-24 AWG	226933
26	6	Manchon caoutchouc noir D1.25mm lg: 20mm	PM0152
27	0.7m	Fil de cablage 0.25mm² bleu et noir	229869 229871
28	2	Gaine thermorétractable D4.8mm lg: 20mm	CO0481

MOLEX 4 POINTS FEMELLE

VUE COTE FIL


TECHNOMED
Medical Systems

Parc d'activité la Poudrette Lamartine
4 Rue du Dauphiné.
69120 VAULX-EN-VELIN - FRANCE
Téléphone : (33) 4.72.15.31.50
Télécopie : (33) 4.72.15.31.51

SONOLITH (((i-sys (Module)

Designation : CABLAGE ANTI COLLISION AMPLI. 23CM

Designation :

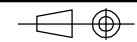

Echelle :

Date :

Date : 06/06/2011

Folio :

Folio : 2/2

Dessine par :

Drawn by : SAN

Verifie par :

Checked by : TJA

ERCO : 09043/SO

Format :

A2

N° du plan :

TMS 230890

A

Ce document est la propriété de TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers.
The copyright of this drawing remains exclusive to TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS.