

30 de Septiembre del 2022

INFORME TECNICO

PRODUCTO:	LASER UROLOGIA H30 S/N: LHT 0209-0217
MARCA:	COOK MEDICAL
ENCARGADO:	JORGE FERNANDEZ
FECHA:	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
INSTITUCION:	CLINICA ALEMANA TEMUCO
TIPO DE ACTIVIDAD:	MANTENCION PREVENTIVA
SOLICITADO POR:	CENCOMEX

Trabajo realizado en el equipo:

Se realizaron las siguientes operaciones en el equipo:

- Prueba de disparo prolongados.
- Revisión de Conexión hembra de fibra.
- Revisión del Focus lens.
- Mantención Preventiva completa.
- Cambio de filtro de agua
- Cambio de agua bidestilada.
- Limpieza filtro partículas
- Revisión del interior del equipo.
- Revisión y calibración del equipo.
- Revisión de espejos.
- Revisión de Resonador.
- Pruebas de funcionamiento.
- Cambio de Blast Shield
- Revisión de pedal del equipo

Al momento de realizar las revisiones y pruebas se detectó lo siguiente:

- Conexión hembra de fibra buena.
- Focus lens en buen estado.
- Estado de los espejos buenos.
- Interior del equipo ok.
- Cavidad óptica ok.
- Calibración corregida.
- Potencia del equipo óptima.

- Pruebas de disparo sin problemas.
- Blast Shield en buen estado.

Blast Shield en uso:



Blastshield Nuevo:




Cambio de agua bidestilada:




Cambio de Deionize Cartridge:



Espejo Frontal bueno:

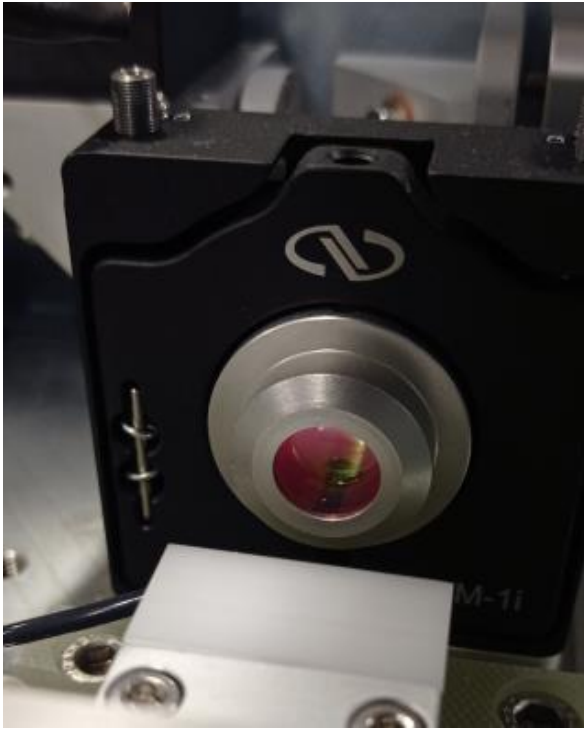

Espejo Trasero bueno:

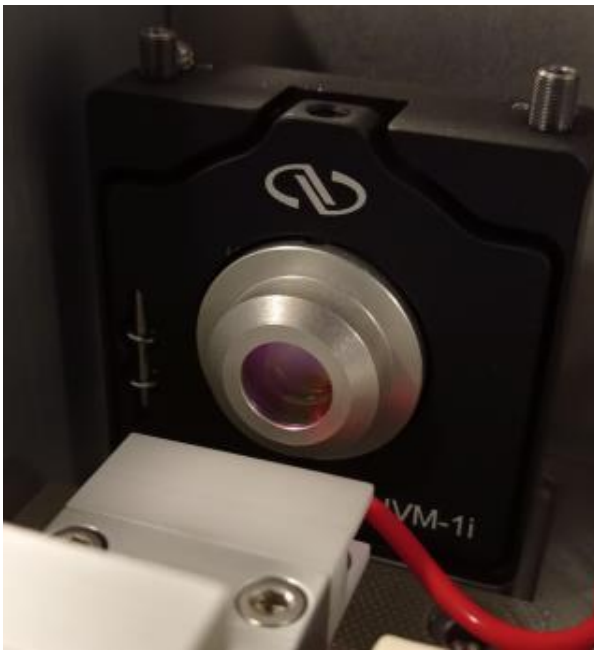

CONCLUSIÓN

Equipo laser alineado y calibrado, se realizaron pruebas de disparo, sin problemas.

El equipo laser modelo H30 S/N: LHT 0209-0217, se encuentra operativo.

Próxima mantención del equipo, Marzo 2022.

Cencomex recomienda realizar mantenciones cada 6 meses.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, identifying Jorge Fernández F.

Jorge Fernández F.
Ingeniero Civil Electrónico
Cencomex S.A.