

15 de Diciembre del 2022

INFORME TECNICO

PRODUCTO:	LASER UROLOGIA CYBER HO 100 S/N: CYH 1247-0422.
MARCA:	QUANTA SYSTEM
ENCARGADO:	JORGE FERNANDEZ
FECHA:	14 DE DICIEMBRE DEL 2022
INSTITUCION:	CLINICA BICENTENARIO / RED SALUD SANTIAGO
TIPO DE ACTIVIDAD:	MANTENCION PREVENTIVA
SOLICITADO POR:	CENCOMEX

Trabajo realizado en el equipo:

Se realizaron las siguientes operaciones en el equipo:


- Prueba de disparo prolongados.
- Revisión de Conexión hembra de fibra.
- Revisión del Focus lens.
- Mantención Preventiva completa.
- Cambio de filtro de agua
- Cambio de agua bidestilada.
- Limpieza filtro partículas
- Revisión del interior del equipo.
- Revisión y calibración del equipo.
- Revisión de espejos.
- Revisión de Resonador.
- Pruebas de funcionamiento.
- Cambio de Blast Shield
- Revisión de pedal del equipo

Al momento de realizar las revisiones y pruebas se detectó lo siguiente:

- Conexión hembra de fibra buena.
- Focus lens en buen estado.
- Estado de los espejos buenos.
- Interior del equipo ok.
- Cavidad óptica ok.
- Equipo alineado.
- Potencia del equipo óptima.

- Blastshield quemado.

Blast Shield en uso:

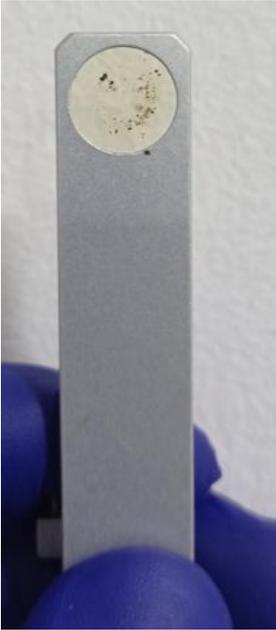

Blast Shield Nuevo:



Prueba de sensores de flujo:

Diagnostics	
Condenser temperature	38.8 °C
H2O Temperature	18.4 °C
Outlet T set	20 °C
Conductivity	1 µS
Total flow	18.7 l/m
Compressor hours	234.3 h
Conduct. hors	234.3 h
Fan hours	234.3 h

CONCLUSIÓN

El equipo laser modelo Cyber HO 100 S/N: CYH 1247-0422, se encuentra con sus repuestos al día.

Se coordina con cliente la reparación de pantalla de UPS en próxima visita.

Próxima mantención del equipo, Junio 2023.

Se aconseja a personal de pabellón y equipos médicos, la revisión periódica del blastshield instalado en equipo laser y fibras ópticas.

Cencomex recomienda realizar mantenciones preventivas cada 6 meses.



Jorge Fernández F.
Ingeniero Civil Electrónico
Cencomex S.A.