

8 de febrero del 2024

### **INFORME TECNICO**

PRODUCTO:	LASER UROLOGIA CYBER TM S/N: CYT 1073-0519
MARCA:	QUANTA SYSTEM
ENCARGADO:	NATALIA ESPINOZA C.
FECHA DE EJECUCIÓN:	7 DE FEBERO DEL 2024
INSTITUCION:	RED SALUD VITACURA
TIPO DE ACTIVIDAD:	MANTENCION PREVENTIVA
SOLICITADO POR:	CENCOMEX S.A.

#### **Trabajo realizado en el equipo:**

Se realizaron las siguientes operaciones en el equipo:

- Prueba de disparo prolongados.
- Revisión de Conexión hembra de fibra.
- Revisión del Focus lens.
- Mantención Preventiva completa.
- Cambio de filtro de agua
- Cambio de agua bidestilada.
- Cambio de filtro de humedad
- Revisión del interior del equipo.
- Revisión de espejos.
- Revisión de Resonador.
- Pruebas de funcionamiento.
- Revisión de fibras.
- Revisión de pedal del equipo


#### **Al momento de realizar las revisiones y pruebas se detectó lo siguiente:**

- Conexión hembra de fibra buena.
- Focus lens en buen estado.
- Estado de los espejos buenos.
- Interior del equipo ok.
- Cavidad óptica ok.
- Pruebas de disparo sin problemas.
- Pedal de equipo operativo.
- Botón de apagado de emergencia ausente.


**Cambio de Filtros:**



**Drenaje y Llenado de Agua:**

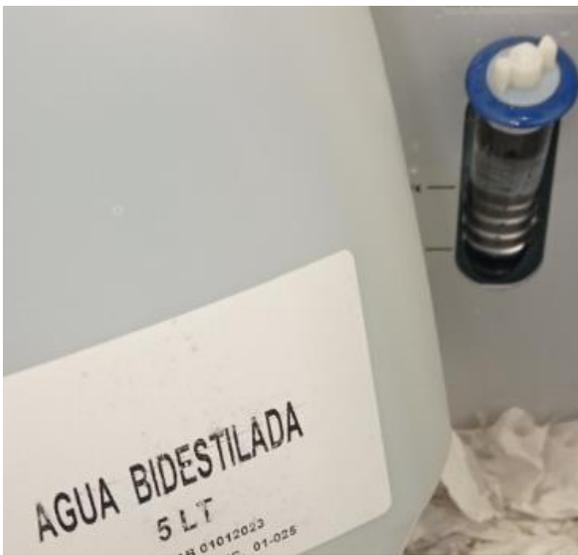

**Filtros de Humedad Nuevo:**

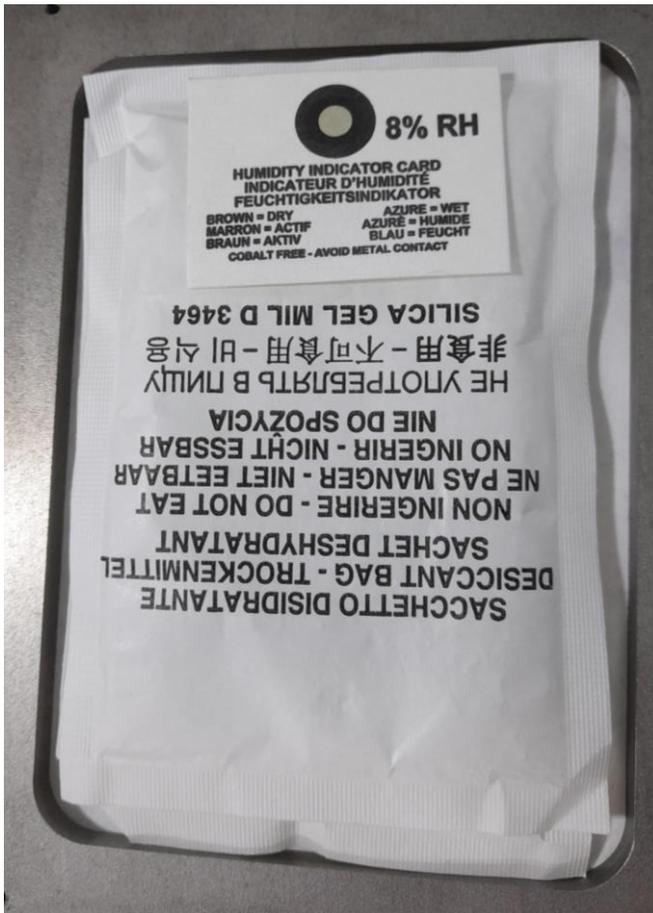

**CONCLUSIÓN**

Equipo laser alineado, se realizaron pruebas de disparo, sin problemas.

El equipo laser modelo CYBER TM S/N: CYT 1073-0519, se encuentra operativo.

Ya que el botón de apagado de emergencia no está presente, se adjunta presupuesto de los repuestos y costos de la mano de obra.

Próxima mantención del equipo, agosto 2024.

**Cencomex recomienda realizar mantenciones preventivas cada 6 meses.**

Natalia Espinoza C.  
Ingeniero de campo  
Cencomex S.A.