



26 de Enero del 2023

INFORME TECNICO

PRODUCTO:	LASER UROLOGIA LITHO S/N: LHT 0549-0318
MARCA:	QUANTA SYSTEM
ENCARGADO:	JORGE FERNANDEZ
FECHA:	26 DE ENERO DEL 2023
INSTITUCION:	HOSPITAL DE COPIAPO
TIPO DE ACTIVIDAD:	MANTENCION PREVENTIVA
SOLICITADO POR:	CENCOMEX
MEDIDOR DE ENERGIA Y	MODELO: MAESTRO
CALIBRADOR DE POTENCIA GENTEC	S/N: 268951
	FECHA DE CALIBRACION: 4/5/2022

Trabajo realizado en el equipo:

Se realizaron las siguientes operaciones en el equipo:

- Prueba de disparo prolongados.
- > Revisión de Conexión hembra de fibra.
- Revisión del Focus lens.
- Mantención Preventiva completa.
- > Cambio de filtro de agua
- Cambio de agua bidestilada.
- > Limpieza filtro partículas
- Revisión del interior del equipo.
- Revisión y calibración del equipo.
- Revisión de espejos.
- Revisión de Resonador.
- Pruebas de funcionamiento.
- Cambio de Blast Shield
- > Revisión de pedal del equipo

Al momento de realizar las revisiones y pruebas se detectó lo siguiente:

- Conexión hembra de fibra buena.
- Focus lens en buen estado.





- Estado de los espejos buenos.
- Interior del equipo ok.
- Cavidad óptica ok.
- Calibración corregida.
- Potencia del equipo óptima.
- Pruebas de disparo sin problemas.
- Blast Shield quemado.

Blast Shield en uso:



Blast Shield Nuevo:







Cambio de Filtro:



Filtro y Agua Nuevos:








Espejo Frontal bueno:



Espejo Trasero bueno:

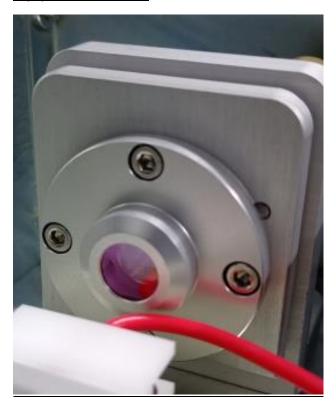





Interlock:



Protector de Fiber Launch:







CONCLUSIÓN

Equipo laser alineado y calibrado, se realizaron pruebas de disparo, sin problemas.

El equipo laser modelo Litho S/N: LHT 0549-0318, se encuentra operativo.

Equipo laser presenta interlock dañado, se aconseja la reposición de uno nuevo.

Equipo laser no posee placa protectora de fiber launch, la cual evita las acumulaciones de polvo en el mismo. Se aconseja la reposición del accesorio completo de manera urgente, ya que la ausencia podría llevar a quemadura en lente focal.

Próxima mantención del equipo, Julio 2023.

Cencomex recomienda realizar mantenciones preventivas cada 6 meses.

Jorge Fernández F. Ingeniero Civil Electrónico Cencomex S.A.