

12 de Noviembre del 2021

**INFORME TECNICO**

|                                                             |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| PRODUCTO:                                                   | LASER UROLOGIA LITHO S/N: LHT 1048-0519. |
| MARCA:                                                      | QUANTA SYSTEM                            |
| ENCARGADO:                                                  | JORGE FERNANDEZ                          |
| FECHA:                                                      | 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021                 |
| INSTITUCION:                                                | HOSPITAL DE QUILPUE                      |
| TIPO DE ACTIVIDAD:                                          | MANTENCION PREVENTIVA                    |
| SOLICITADO POR:                                             | CENCOMEX                                 |
| MEDIDOR DE<br>ENERGIA Y<br>CALIBRADOR DE<br>POTENCIA GENTEC | MODELO: MAESTRO                          |
|                                                             | S/N: 242057                              |
|                                                             | FECHA DE CALIBRACION: 31/5/2021          |

**Trabajo realizado en el equipo:**

Se realizaron las siguientes operaciones en el equipo:

- Prueba de disparo prolongados.
- Revisión de Conexión hembra de fibra.
- Revisión del Focus lens.
- Mantención Preventiva completa.
- Cambio de filtro de agua
- Cambio de agua bidestilada.
- Limpieza filtro partículas
- Revisión del interior del equipo.
- Revisión y calibración del equipo.
- Revisión de espejos.
- Revisión de Resonador.
- Pruebas de funcionamiento.
- Cambio de Blast Shield
- Revisión de pedal del equipo
- Revisión de fibras ópticas.

**Al momento de realizar las revisiones y pruebas se detectó lo siguiente:**

- Conexión hembra de fibra buena.

- Focus lens en buen estado.
- Estado de los espejos buenos.
- Interior del equipo ok.
- Cavidad óptica ok.
- Calibración corregida.
- Potencia del equipo óptima.
- Pruebas de disparo sin problemas.
- Blast Shield en buen estado.

**Blast Shield en uso:**



**Blast Shield Nuevo:**




**Cambio de Filtro:**



**Filtro y Agua Nuevos:**



Espejo Frontal bueno:

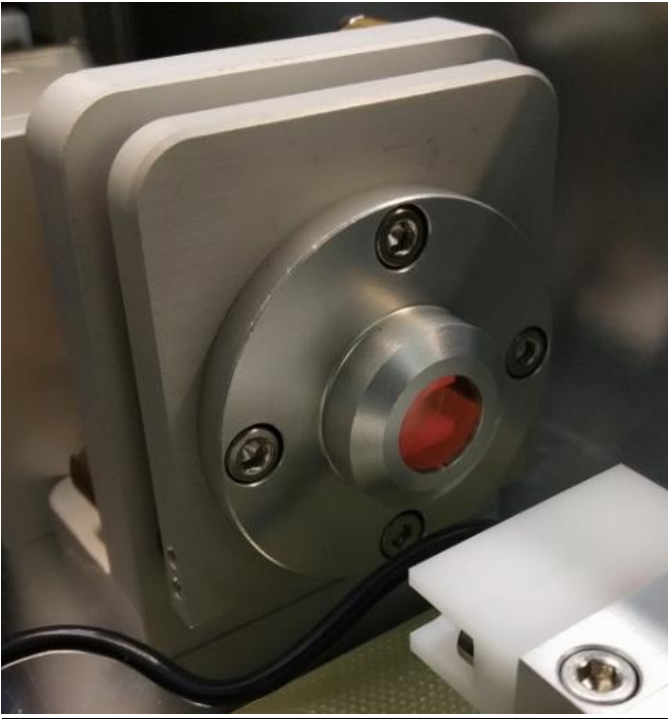

Espejo Trasero bueno:



## CONCLUSIÓN

Equipo laser alineado y calibrado, se realizaron pruebas de disparo, sin problemas.

El equipo laser modelo Litho S/N: LHT 1048-0519, se encuentra operativo.

Próxima mantención del equipo, Mayo 2022.

**Cencomex recomienda realizar mantenciones preventivas cada 6 meses.**



Jorge Fernández F.  
Ingeniero Civil Electrónico  
Cencomex S.A.