

7 de Mayo del 2021

INFORME TECNICO

PRODUCTO:	LASER UROLOGIA LITHO S/N: LHT 1127-0720
MARCA:	QUANTA SYSTEM
ENCARGADO:	JORGE FERNANDEZ
FECHA:	4 DE MAYO DEL 2021
INSTITUCION:	HOSP. DR. HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
TIPO DE ACTIVIDAD:	MANTENCION PREVENTIVA
SOLICITADO POR:	CENCOMEX

Trabajo realizado en el equipo:

Se realizaron las siguientes operaciones en el equipo:

- Prueba de disparo prolongados.
- Revisión de Conexión hembra de fibra.
- Revisión del Focus lens.
- Mantención Preventiva completa.
- Cambio de filtro de agua
- Cambio de agua bidestilada.
- Limpieza filtro partículas
- Revisión del interior del equipo.
- Revisión y calibración del equipo.
- Revisión de espejos.
- Revisión de Resonador.
- Pruebas de funcionamiento.
- Cambio de Blast Shield
- Revisión de pedal del equipo
- Revisión de fibras ópticas.

Al momento de realizar las revisiones y pruebas se detectó lo siguiente:

- Conexión hembra de fibra buena.
- Focus lens en buen estado.
- Estado de los espejos buenos.
- Interior del equipo ok.
- Cavidad óptica ok.
- Calibración corregida.

- Potencia del equipo óptima.
- Pruebas de disparo sin problemas.
- Blast Shield en buen estado
- Interlock dañado.

Blast Shield en uso:



Blast Shield Nuevo:




Cambio de Filtro:



Filtro y Agua Nuevos:



Espejo Frontal bueno:

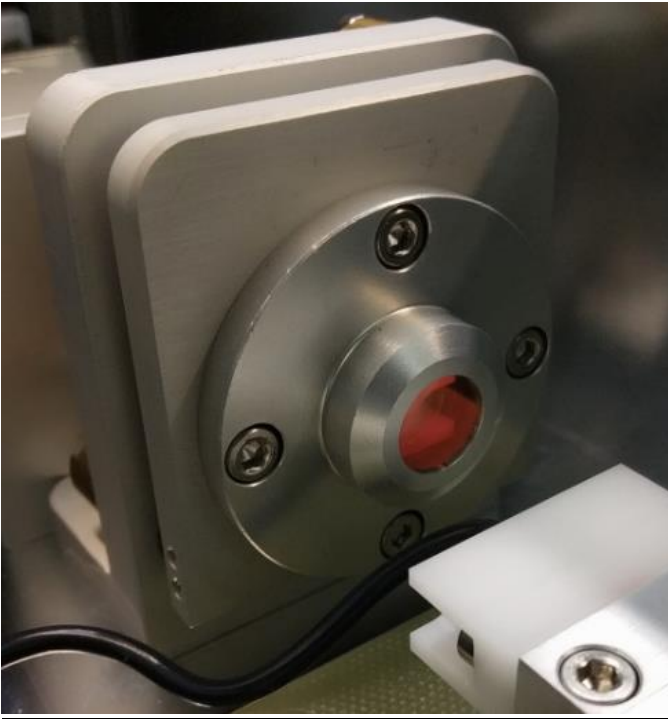

Espejo Trasero bueno:



Interlock



CONCLUSIÓN

Equipo laser alineado y calibrado, se realizaron pruebas de disparo, sin problemas.

Se detectó interlock dañado, por lo que se le sugiere al cliente realizar el cambio por uno nuevo.

El equipo laser modelo Litho S/N: LHT 1127-0720, se encuentra operativo.

Próxima mantención del equipo, Noviembre 2021.

Cencomex recomienda realizar mantenciones preventivas cada 6 meses.



Jorge Fernández F.
Ingeniero Civil Electrónico
Cencomex S.A.